

BOOM BathFun elektronická vakuová vodní pumpa

Návod k použití

Elektronická vakuová pumpa určená k použití ve vodě - ve vaně nebo sprše, ale i na vzduchu. Její princip spočívá ve využití síly vody, respektive nestlačitelnosti vody ke zvětšení vašeho penisu, do délky i do šířky. Vakuovou pumpu můžete samozřejmě používat i mimo vodu.

Parametry:

Materiál:	ABS plast, akrylát (PMMA), silikon
Celková délka:	30 cm
Použitelná délka:	18 cm
Max. průměr:	6,5 cm
Funkce:	3 stupně podtlaku
Napájení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)

Popis výrobku:

Pumpa se skládá ze tří částí:

- A) **Řídící jednotka** vyrobená z ABS plastu. Je vybavena třemi ovládacími tlačítky. Modré je tzv. cestovní zámek,  ovládá 3 stupně podtlaku a tlačítko  rychle snižuje podtlak. Na špičce řídící jednotky je umístěn vypouštěcí ventil.
- B) **Válec** je vyroben z čirého akrylátu a je na něm vyznačena měrná stupnice v centimetrech a palcích. Vnitřní průměr válce je 6,5 cm a použitelná délka 18 cm.
- C) **Manžeta** je vyrobená ze silikonu. Otvor v ní má min. průměr 2,8 cm. Z válce se dá sejmut.

Ovládání: Na pumpě jsou tři ovládací tlačítka. Je vybavena tzv. cestovním zámkem. Modré tlačítko stisknete pod dobu 3 sekund, tlačítko se rozsvítí a pumpa je "odemčena". Stiskem  tlačítka se ve válci začne vytvářet podtlak. Ve špičce je ventil, ze kterého je motorkem ven z válce pumpována voda, nebo vzduch. Dalšími stisky tohoto tlačítka se mění výkon čerpadla, intenzita vytváření podtlaku stoupá rychleji, celkem jsou k dispozici tři stupně, nebo chcete-li rychlosti. Pokud jste dosáhl podtlaku, který vám vyhovuje a chcete ho ve válci udržet, krátce stisknete modré tlačítko. Pokud chcete ve válci rychle snížit podtlak, stisknete spodní, třetí tlačítko. Přidržením ventil nahoře začne nasávat zpět vodu nebo vzduch (podle toho v jaké prostředí pumpa je), ale to probíhá již samovolně do vyrovnání podtlaku ve válci, bez běhu čerpadla.

Použití: pravidelné použití této pumpy udržuje váš penis v kondici - vaše erekce bude dlouhotrvající a vaše sexuální potěšení maximální.

Doporučení:

Produkt jsme testovali a doporučujeme použít na penis silikonový lubrikant, ten není vodou tak snadno omyvatelný. Tření žaludu po stěně válce "na sucho", byť pod vodou, není úplně nejpříjemnější zážitek.



Pokud chcete ve vaně rychle snížit podtlak ve válci, musíte vytáhnout ventil umístěný na vrcholu pumpy nad hladinu, aby mohl rychle nasát vzduch. Jinak nasává vodu a podtlak klesá pomalu.

Pumpa je dost silná, nikdy nepokračujte se zvyšováním podtlaku do bolesti. Stačí cítit podtlak a delší dobu. I zde platí, že někdy méně je více. V tomto případě menší síly, ale pravidelně a po delší dobu.

Lubrikační gel: při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Vzhledem k tomu že manžeta je vyrobena ze silikonu doporučujeme silikonový lubrikant BOOM,** který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Řídicí jednotku a válec můžete omýt teplou vodou a můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci s alkoholem určenou na erotické pomůcky.

Silikonovou manžetu můžete omýt teplou vodou a můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přeruš'te používání výrobku, pokud zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.

snadná údržba
lze rozložit
na 3 části
řídicí jednotka
válec
manžeta

